

手順書① NJJ-200Exアプリ測定データのバックアップおよび復元手順書

NJJ-200Exスマホアプリの測定データのバックアップ手順


※[NJJ-200Ex]アプリをアンインストールする前に、必ず、測定データをパソコンなどへバックアップしてください。

1. パソコンとスマートフォンをUSBケーブルで接続します

パソコンがスマートフォンを認識すると画像①が表示されるか、エクスプローラから画像②のようにAndroid端末を選択してください




画像①

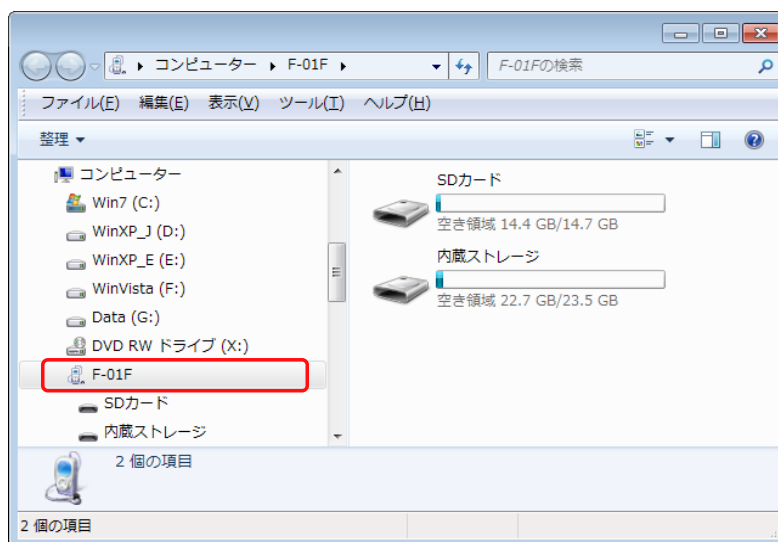

画像②

2. 「SDカード」または「内蔵ストレージ」をダブルクリックして開きます


測定データの保存先によって「SDカード」か「内蔵ストレージ」を選択してください

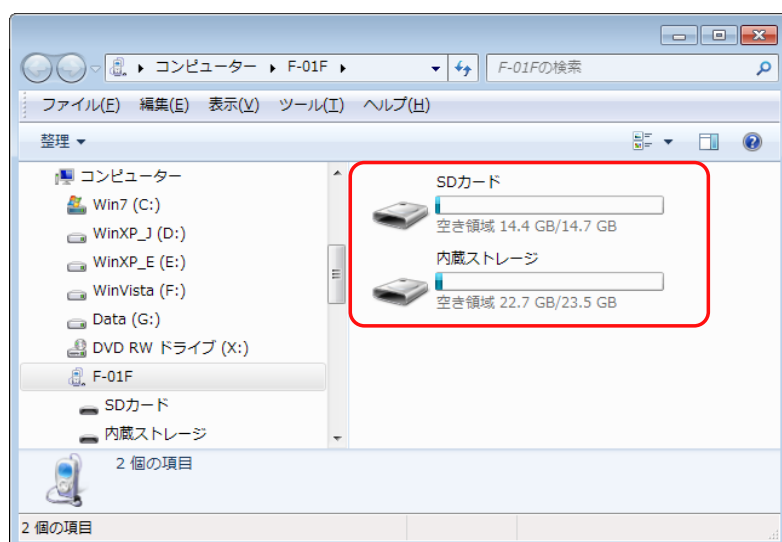

3. 測定データをデスクトップにコピーします


測定データの保存先は、Android OSのバージョンとアプリのバージョンによって異なります
以下の手順から、お手持ちのAndroid端末にあった手順で作業を進めてください

3-1. 「SDカード」にNJJ200フォルダがある場合

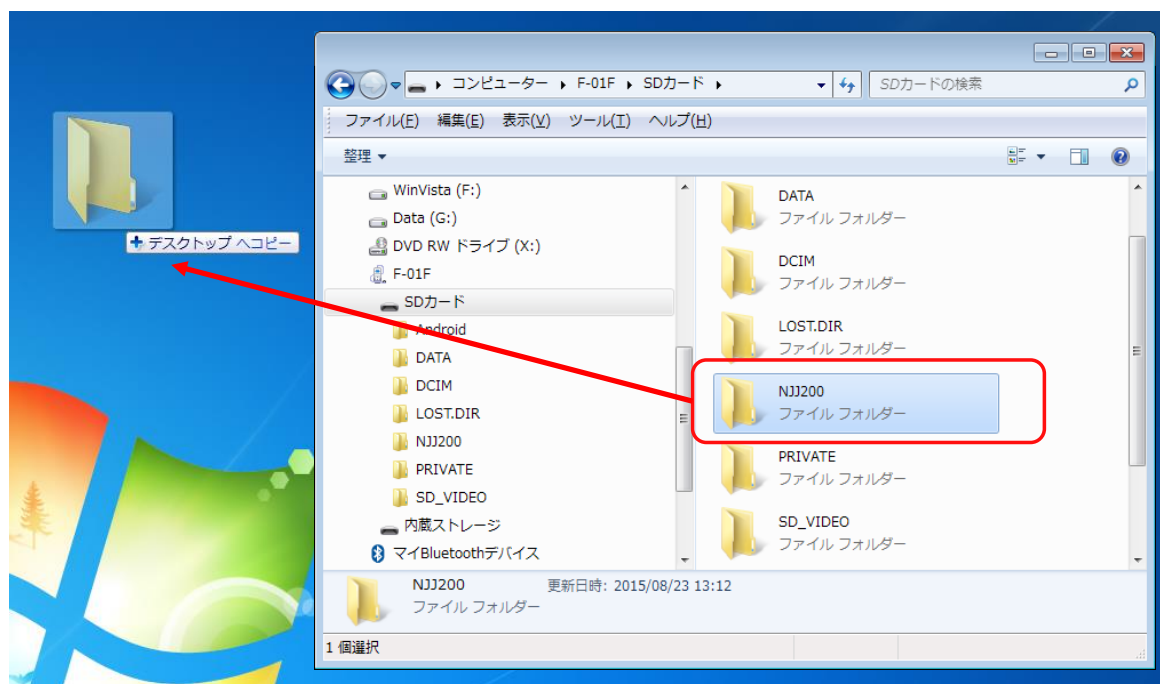


3-2. 「内蔵ストレージ」にNJJ200フォルダがある場合

既に上記3-1でデスクトップにコピーしている場合は、デスクトップにコピーしたフォルダの名前を変更してから、次へ進んでください

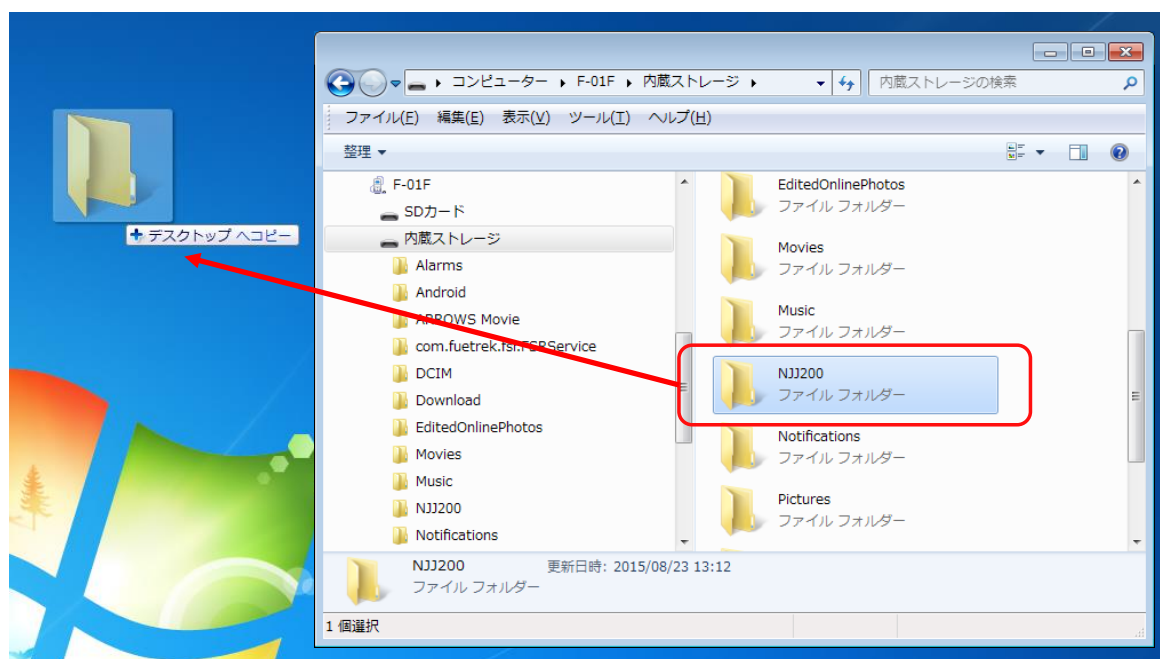


3 – 3. 「SDカード」に com.kgs.njj200kgs フォルダがある場合

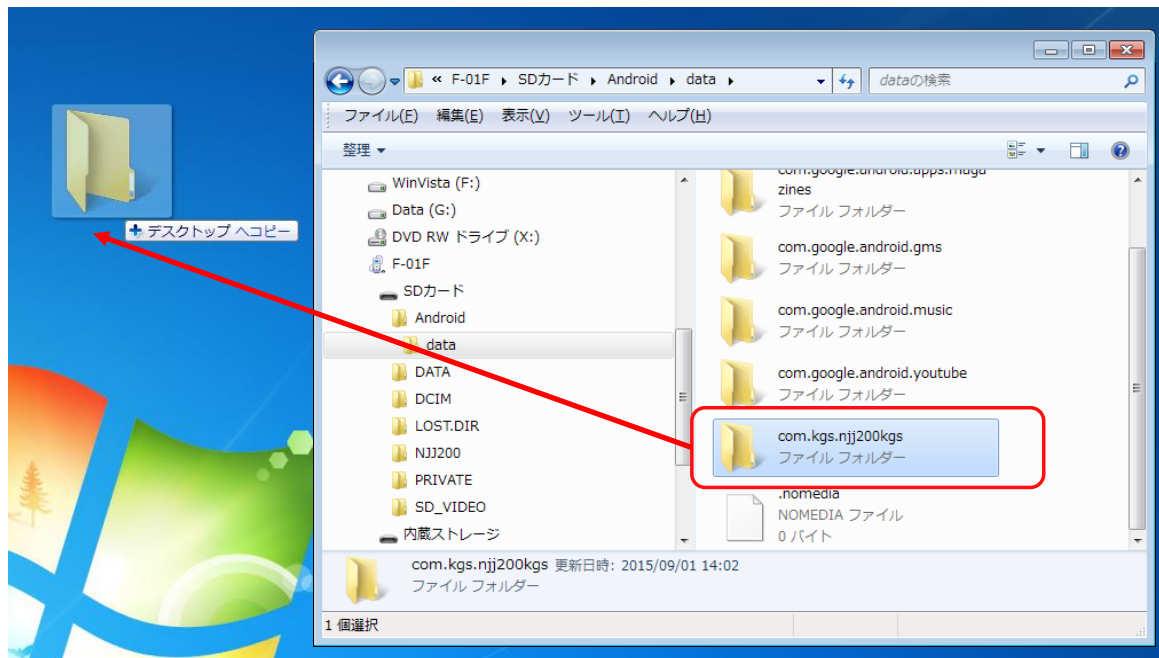

3 – 4. 「内蔵ストレージ」に com.kgs.njj200kgs フォルダがある場合

既に上記 3 – 3 でデスクトップにコピーしている場合は、デスクトップにコピーしたフォルダの名前を変更してから、次へ進んでください

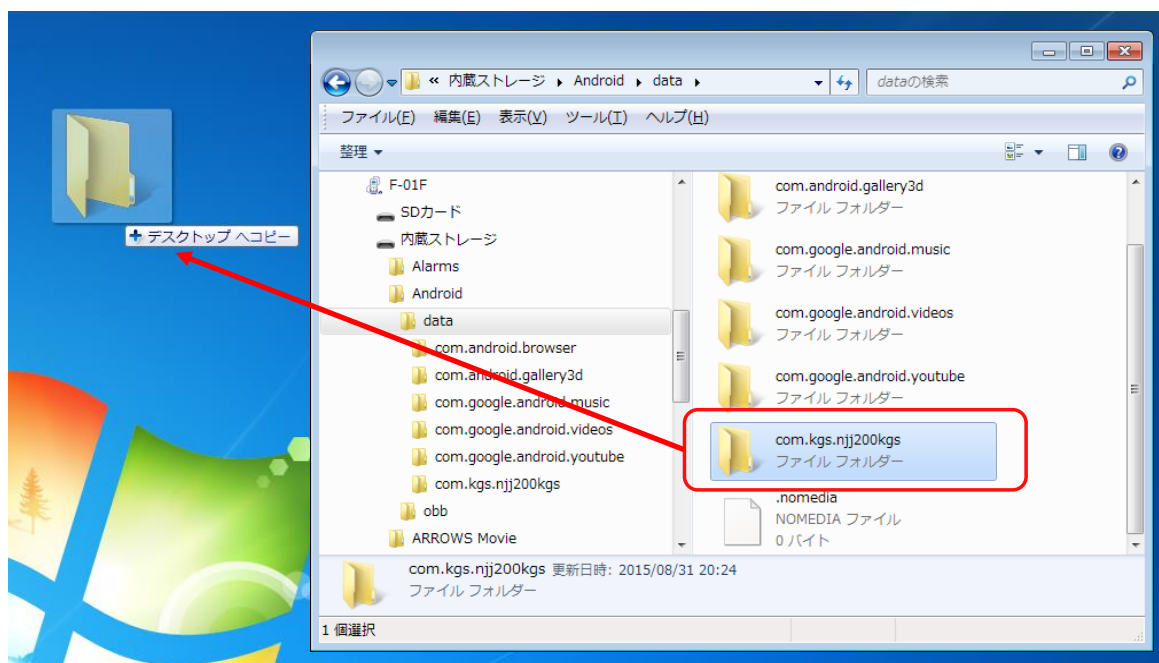


4. 以上でバックアップは終了です

NJJ-200Exスマホアプリの測定データの復元手順


※[NJJ-200Ex]アプリをインストールして、一度アプリを起動した後に測定データを復元してください。

1. パソコンとスマートフォンをUSBケーブルで接続します

パソコンがスマートフォンを認識すると画像①が表示されるか、エクスプローラから画像②のようにAndroid端末を選択してください

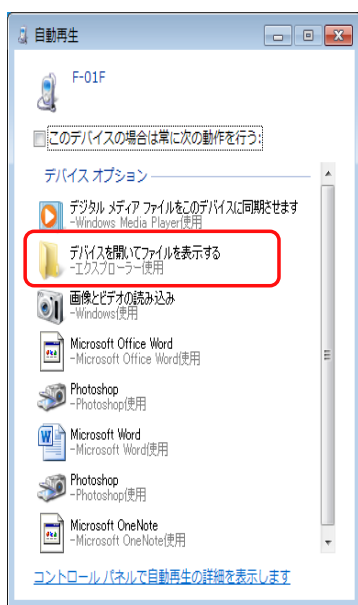


画像①

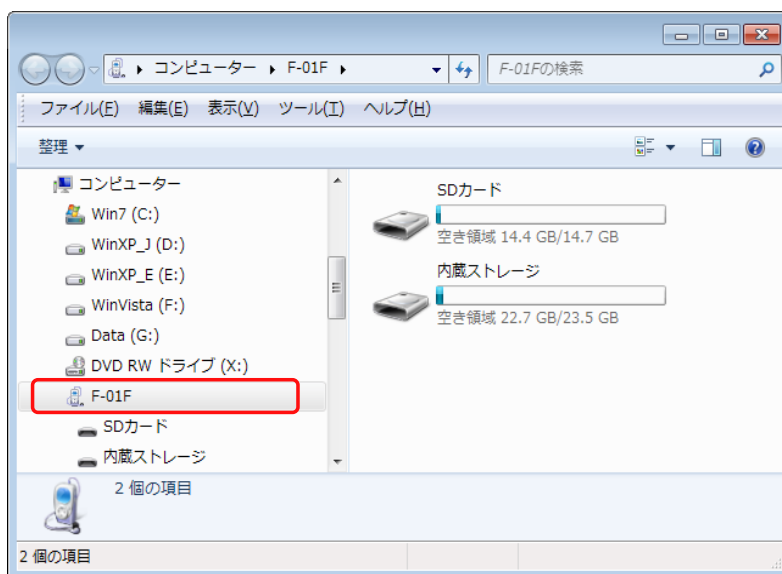


画像②

2. 「内蔵ストレージ」をダブルクリックして開きます

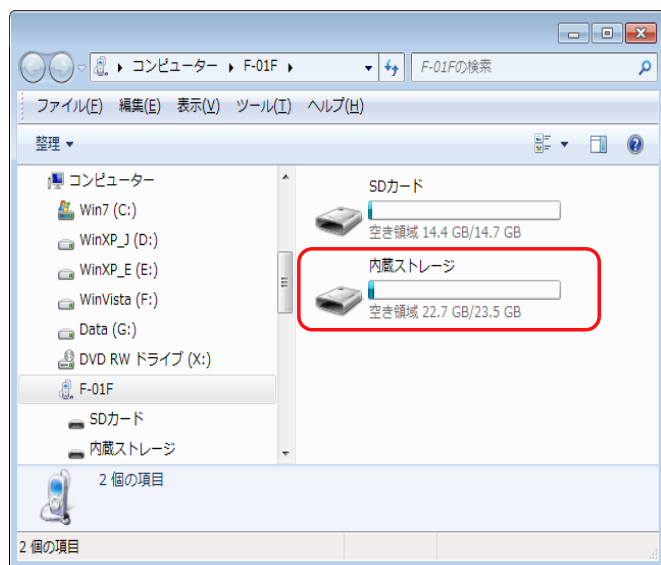


3. 内蔵ストレージのNJJ200フォルダをダブルクリックして開きます

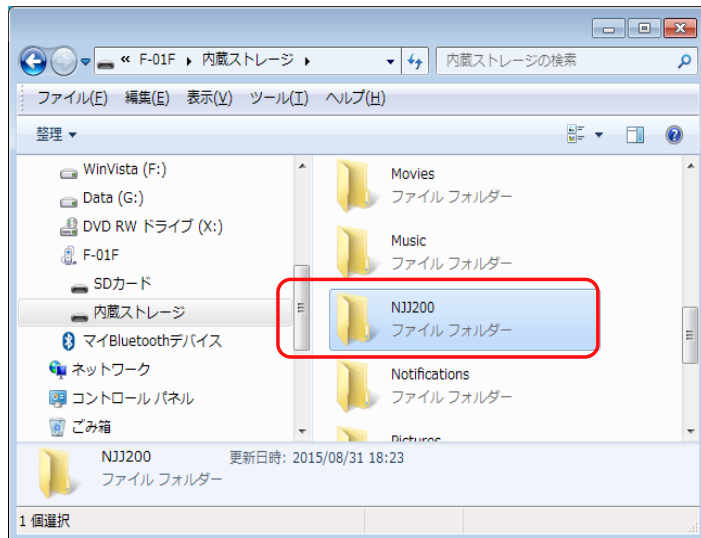


3 - 1. NJJ200フォルダをバックアップした場合

デスクトップにバックアップしたNJJ200フォルダをダブルクリックして開き、フォルダ内のData1～10までをAndroid端末のNJJ200フォルダにコピーします

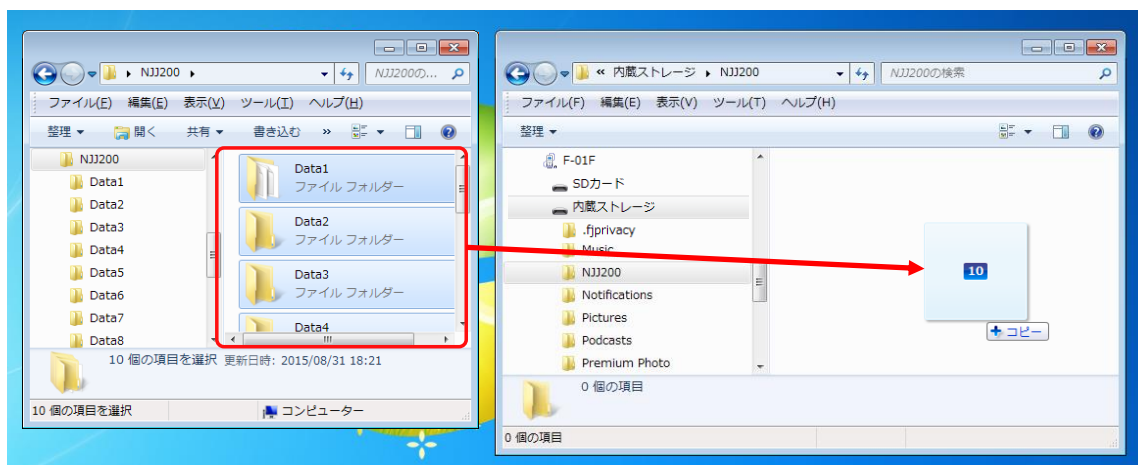

3 - 2. com.kgs.njj200kgsフォルダをバックアップした場合

デスクトップにバックアップしたcom.kgs.njj200kgsフォルダをダブルクリックして開き、フォルダ内のData1～10までをAndroid端末のNJJ200フォルダにコピーします

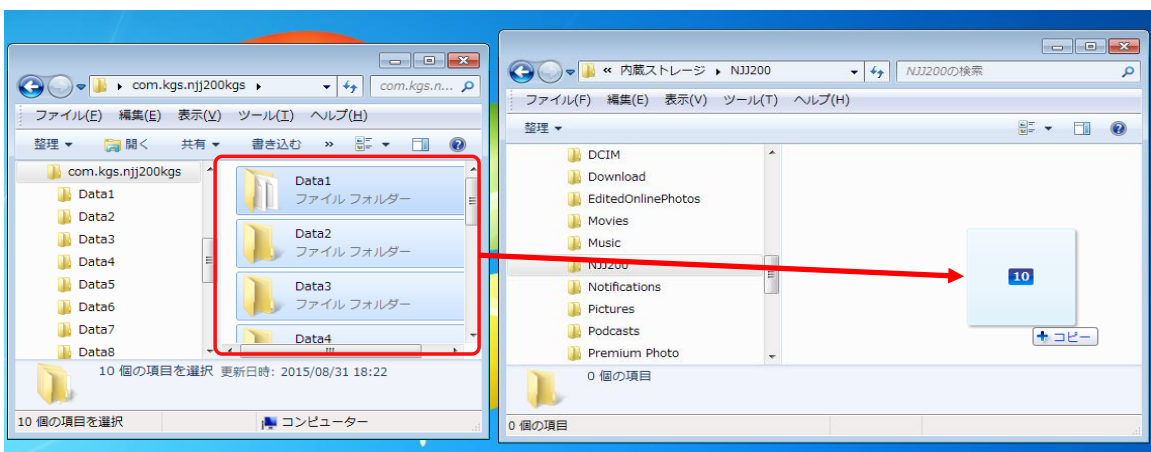

4. 以上でバックアップの復元は終了です